


BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 427H

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **427H** é uma fita adesiva creme com dorso de papel crepado tratado com solução a base borracha e coberto com adesivo a base de borrachas e resinas. Recomendada para aplicações hospitalares, deve ser utilizada uma única vez e destruída após o seu uso.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:

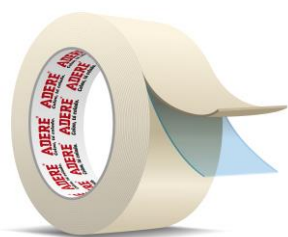

Papel crepado tratado com solução base borracha

Adesivo base borrachas e resinas

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Cor da fita: Creme

Espessura da fita: 0,120 mm +/- 0,02mm

Temperatura mínima de aplicação: 15°C

Temperatura de trabalho: -20 a 60°C.

APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:

APRESENTAÇÃO: Consultar Equipe Comercial.

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 427H**DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):**

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180° 	Aço	169 gf/cm	PSTC 101
Tack Rolling Ball 	Esfera de aço diâmetro 11,1 mm	1,0 cm	PSTC 6
Tração e Alongamento 	Tração Alongamento	2,2 kgf/cm 8,7 %	PSTC 131

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

INSTRUÇÕES DE USO:

Desenrolar o tamanho necessário da fita e cortar com uma tesoura. Aplicar a face aparente do adesivo exercer pressão uniforme e constante sobre a superfície a ser fixada: ataduras, bandagem, identificação de seringas e mamadeiras, e fechamento de pacotes.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

Não aplicar a fita diretamente sobre a pele;

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>